

Hanse-Desinfektionsreiniger N und Körperpflegemittel



Desinfektion · Reinigung · Pflege

Hanse-Desinfektionsreiniger N

Mit dem Hanse-Desinfektionsreiniger N garantieren wir Ihnen eine ideale hygienische Aufbereitung Ihrer Hanse-Pflegebäder sowie die perfekte Reinigung und Desinfektion von kleineren und größeren Flächen. Mit dem einzigartigen Mischungsverhältnis erreichen Sie hohe Effektivität und Ergiebigkeit.

Flüssiges Konzentrat zur Flächendesinfektion und Reinigung

- aldehydfreies Präparat mit guter Reinigungskraft
- parfümfrei



Präparatetyp

Hanse-Desinfektionsreiniger N ist ein Kombinationspräparat zur Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar, Medizinprodukten sowie Flächen aller Art. **Hanse-Desinfektionsreiniger N** ist auf modernen quartären Ammoniumverbindungen aufgebaut. Es enthält keine Aldehyde und Phenole, zeichnet sich durch eine geringe Toxizität bei guter Reinigungskraft aus und ist parfümfrei.

Hanse-Desinfektionsreiniger N ist besonders geeignet für Bereiche, in denen neben der Erfüllung hoher hygienischer Anforderungen eine Geruchsbelästigung vermieden werden muss. **Hanse-Desinfektionsreiniger N** ist auch als alkoholfreie Schnelldesinfektion zu verwenden. Für Acrylglas geeignet.

Hanse-Desinfektionsreiniger N erfüllt die gesetzlichen Anforderungen zur Arbeitssicherheit gem. TRGS 525/540. Produkt-Code für Reinigungs- und Pflegemittel gem. GISBAU: GD 30.

Anwendungsbereiche

Gem. MPG: Desinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichen Medizinprodukten wie Inkubatoren.

Gem. Biozidrichtlinie: Zur Flächendesinfektion und -Reinigung von medizinischem Inventar und Flächen aller Art.

Wir empfehlen den Hanse-Desinfektionsreiniger N zur Desinfektion und Reinigung der Hanse-Pflegebäder.

Anwendung

1. Scheuer-Wisch-Desinfektionen, Zwei-Eimer Methode oder ähnliche Verfahren.
2. Aus zentralen oder dezentralen Dosieranlagen (BAM geprüft für DG3).
3. Sprühen aus stationären oder mobilen Geräten.
4. Mit nachfüllbaren Dosierflaschen.

Wirkungsspektrum

Hanse-Desinfektionsreiniger N wirkt :

- bakterizid (inkl. MRSA)
- fungizid
- virusinaktivierend (Vaccinia-, BVDV und daher im Analogieschluss gem. RKI wirksam gegenüber HBV, HIV, HCV sowie Papova-/Polyoma- und Rota-Viren)

Dosierung / Einwirkzeit

bakterizid. inkl. MRSA, fungizid	2,5%	15 Min.
gem. DGHM/VAH-Richtlinien	2,0 %	30 Min.
geprüft bei erhöhter Belastung	1,0 %	1 Std.
	0,75%	4 Std.
als alkoholfreie Schnelldesinfektion:	7,5 %	1 Min.
	5,0 %	5 Min.
wirksam gegen behüllte Viren		
inkl. HBV/HIV/Vaccinia/HCV/BVDV		
(begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung)	1,0 %	15 Min.
	7,5 %	1 Min.
HCV/BVDV	0,5 %	15 Min.
Papova-/Polyoma-Viren	1,0 %	1 Std.
	7,5 %	5 Min.
Rota-Viren	0,25%	1 Min.

Hanse-Desinfektionsreiniger N

Zusammensetzung

In 100 g sind enthalten:

3,35 g Didecyldimethylammoniumchlorid
3,35 g Alkylbenzyltrimethylammoniumchlorid
3,30 g Alkyldimethylethylbenzylammoniumchlorid

Chemisch-Physikalische Daten

Aussehen des Konzentrates: klare, farblose Flüssigkeit
pH-Wert: 7,25 +/- 1,25

Besondere Hinweise

Reizt die Haut. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Gefahr ernster Augenschäden. Schutzbrille/ Gesichtsschutz tragen. Dampf/ Aerosol nicht einatmen. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

Bei nicht für die Haut bestimmten Desinfektionsmitteln ist das Tragen von Schutzhandschuhen von den Berufsgenossenschaften vorgeschrieben.

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Gutachten

Prof. Dr. Schubert, Hygieniker, Frankfurt/Main:
Gutachten zur Flächendesinfektion gem. neuen DGHM/VAH-Richtl. 9/2001 vom 26.06.2009.

Prof. Dr. Med. H.-P. Werner, Facharzt für Hygiene und Mikrobiologie, Bischofshofen:
Gutachten zur Flächendesinf. gem. DGHM/VAH-Richtl., 14.07.2009.

Dr. Puchert, Zentrum für Hygiene und medizinische Produktsicherheit, Bischofshofen:

Gutachten zur Wirksamkeit gegenüber: Hepatitis-BViren, Rota-Viren, Vacciniavirus, BVDV (HCV), Papova-/Polyoma, (1% / 1,5% / 7,5 %).

Registrierung/Zertifizierung

Aufgenommen in die aktuelle Desinfektionsmittelliste der DGHM/VAH.

Entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.

Dosierhilfen und Zubehör

- Pumpe für 10 Liter-Kanister
- Dosierhahn für 10 Liter-Kanister
- Portionsflasche 0,5 Liter
- Dosierflasche 1 Liter für den Hanse-Desinfektionsreiniger N
- Langstielige Wannенbürste

Lieferformen:

- 10 Liter Kanister



Abbildung mit Zubehör: 1 Liter Dosierflasche, Pumpe und Dosierhahn

Körperpflegemittel



Hautpflegeöl

Das Hanse-Hautpflegeöl ist ein hochwertiges Pflegeöl zum Baden, Duschen und zur Inkontinenzpflege. Wertvolle Inhaltsstoffe wie Guajazulen, Betain, Lanolin und Weizenkeimöl gewährleisten einen sparsamen Gebrauch bei gründlicher Reinigung und Pflege sowie gleichzeitig geschmeidiger und weicher Haut.

Rosmarin-Ölbäd

Das Ölbäd ist ein belebender Badezusatz zur Reinigung und Pflege, das die Durchblutung fördert. Die zusätzliche Verwendung von Pflegemitteln erübrigt sich und eine Rückfettung des Ölbadens sorgt für eine weiche und geschmeidige Haut.

Pflegeshampoo

Der Einsatzbereich des Hanse-Pflegeshampoos reicht von der Haar- und Körperpflege bis hin zur Intimpflege. Es ist ein mildes Shampoo, das weder Auge noch die Schleimhäute reizt. Es beinhaltet die pflegenden Substanzen Betain, Lanolin und Protein. Ein pH-Wert von 5,5 schützt den natürlichen Säureschutzmantel der Haut. Das Shampoo ist seifen- und alkalifrei.

Lieferformen:

- 0,25 Liter-Flasche
- 1 Liter-Flasche
- 10 Liter-Flasche

