

Kent 7 lifterwanne

Ein integriertes Badesystem, entworfen für den intensiven Einsatz in Krankenhäusern und Pflegeheimen

Kent als Lifterbadewanne mit elektrischem Sitz bietet das Beste vom Besten. Durch eine Reihe von Optionen und die Kombination von Höhenverstellbarkeit der Wanne und des Sitzes sind Patient und Pfleger in der Lage, die Badewanne einfach, bequem und vollkommen sicher zu verwenden. Der Sitz ist außerhalb der Badewanne absenkbar, um einfachen Zugang zu ermöglichen; die Auswahl an Armlehnen ist groß.

Die höhenverstellbare Kent-Badewanne mit Transfersitz genügt sowohl den Bedürfnissen des Patienten als auch denen des Pflegenden. Der Sitz ist nicht nur auf eine Höhe absenkbar, die von Rollstuhl oder Lifter aus bequem zu erreichen ist, sondern trägt den Patienten auch mit Leichtigkeit in die Badewanne. Die Höhe der Wanne ist verstellbar, um eine komfortable Arbeitsposition für den Pflegenden zu ermöglichen, und die Oberflächen sind stabil und pflegeleicht.

3 Einfache Schritte



3

Passen Sie die Höhe von Badewanne und/oder Sitz Ihrer bevorzugten Arbeitshaltung an.



2

Wenn der Patient sich sicher über dem Wasser befindet, senken Sie ihn entweder ab oder heben die Wanne an.



1

Füllen Sie die Wanne zuvor mit dem TMV-3 kontrollierten Füllsystem. Bringen Sie den Patienten zur Badewanne (mit dem optionalen abnehmbaren Transferstuhl) und heben Sie ihn im elektrischen Sitz an.

Stressfreies Baden in ein paar Schritten

Senken Sie den Sitz außerhalb der Badewanne auf eine komfortable Höhe ab und platzieren Sie den Patienten darauf. Wenn er bequem sitzt, betätigen Sie einen Knopf, und der Sitz hebt sich mit dem Patienten über den Wannenrand. Der Pflegenden kann nun die bereits befüllte Wanne anheben und den Patienten komfortabel und ohne Überanstrengung baden. Zum Schluss wird die volle Badewanne abgesenkt. Der Sitz fährt außerhalb der Wanne nach unten, und der Patient kann fortgebracht werden.



Abnehmbarer Transferstuhl

Kent erhalten Sie auch mit einem mobilen Transportsystem, um den Patienten mit minimalem Aufwand zwischen Bett und Badewanne bewegen zu können.

Beinlifter

Ein optionaler Beinlifter steht für den elektrischen Sitz zur Verfügung, ist allerdings mit dem abnehmbaren Transferstuhl (s.o.) nicht kompatibel.




Optionen

- W.R.A.S.-zertifizierte Dusche mit Handsteuerung
- Air-Spa
- Abnehmbarer Transferstuhl
- Sicherheitsgurt
- Kindersitz verfügbar

Checkliste

- Voll anpassbare Lifter- und Transferbadewanne
- 1800 mm Länge
- Ersatz-Akkubatterie
- Belastbarkeit bis 150 kg
- Belastbarkeit bis 139,7 kg (Abnehmbarer Transferstuhl)
- 24V Betriebsspannung
- Extratief
- Auch ohne elektrischen Liftersitz verfügbar
- Elektronischer Diagnosebildschirm
- W.R.A.S.-geprüfter 3"-Hebelzulauf - (0804041)
- Links - oder rechtsgängige Installation

Abmessungen

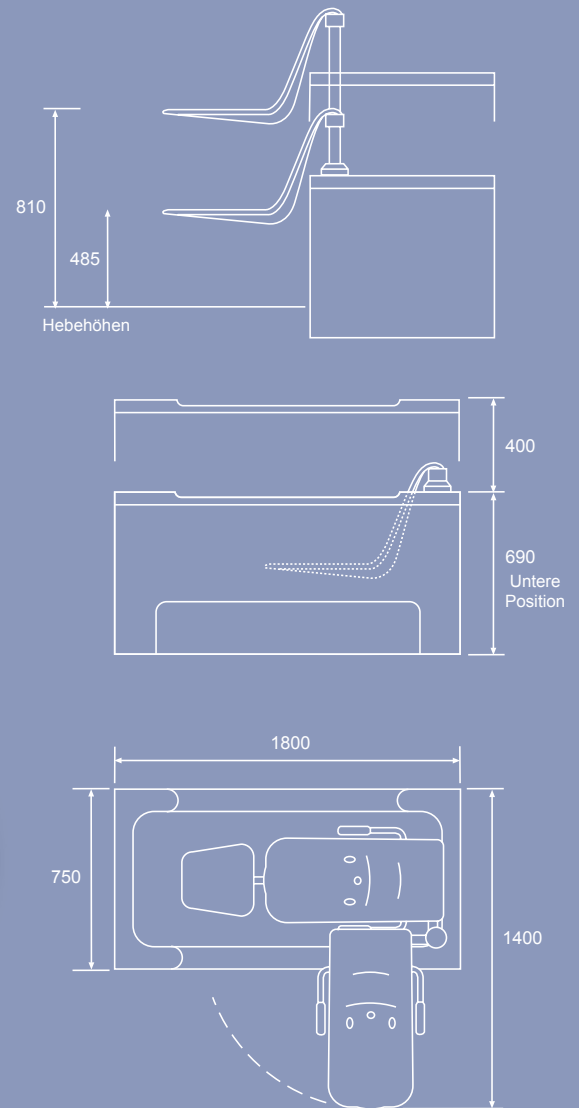

Jetzt auch ohne elektrischen Liftersitz verfügbar

